

La Cremerie®

RADIOFREQUENZA

Dispositivo di Bellezza
per Viso e Corpo

Manuale d'uso



CONTENUTI

Contenuto della confezione /principi di funzionamento RF...	1
Trattamenti Viso.....	2
Trattamenti Corpo	3
Autocalibrazione	4
Struttura del display.....	5
Modalità di utilizzo	6
Precauzioni prima dell'utilizzo.....	9
Metodi operativi per l'utilizzo del prodotto.....	10
Domande e risposte	11
Certificazione CE	12

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- RF: 2MHZ/tipolare/sestupolare
- Energia di uscita Consumo : 50W
- Peso lordo: 3.5 kg
- Manipoli : 1 Corpo + 1 Vaso
- Misure: 500*400*200 mm
- Voltaggio: 240V, 3A (max), 50 Hz
- Alimentatore grado medicale 24v
- (medical 60601-1 4th edition safety approvals)
- Certificazione CE (Italia)
- Manuale D'Uso



RF PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Viso : Una pelle elastica e tonica è dovuta alle fibre di collagene del derma che forma la struttura della pelle. Con l'avanzare dell'età la rigenerazione di collagene della pelle diminuisce, quindi la pelle perde morbidezza, si secca e favorisce la generazione delle rughe.

e quindi, per mantenere la pelle giovane, è necessario stimolare la produzione di nuovo collagene. Questo metodo di trattamento è caratteristico: non solo ha un effetto rassodante istantaneo ma può anche potenziare l'effetto di rigenerazione di lunga durata del collagene.

Corpo: E' possibile raggiungere gli strati meno superficiali della pelle per agire sulle adiposità localizzate e stimolare effetti di lipolisi localizzate, permettendo una rapida attivazione e attivare la naturale espulsione delle tossine in eccesso dalle ghiandole sudoripare, dalla circolazione enteroepatica e dalla linfa, quindi ottenere un effetto di lipolisi.



PRINCIPALI FUNZIONI E PERFORMANCE

Viso RF

Effetto rassodante istantaneo della pelle grazie all'interazione con il collagene della pelle durante il trattamento. Genera un effetto lifting e rassodante subito dopo il trattamento anche sui tessuti meno tonici producendo un effetto di rigenerazione di lunga durata.

Fino 2 /6 mesi dopo il trattamento vi è un notevole recupero della tonicità e dell' elasticità del derma, le rughe diventano gradualmente da profonde a poco profonde.

Come funziona la radiofrequenza estetica? Un apposito manipolo trasmette impulsi elettrici a radio frequenza i quali determinano un aumento dell'energia rotazionale delle molecole di alcune sostanze e in particolare dell'acqua. Questo repentino aumento di energia si trasforma in calore che riscalda in profondità la pelle.

Un aumento di 4/6 gradi centigradi ha un notevole effetto biologico nel derma superficiale e profondo, con la conseguente denaturazione delle fibre più deboli di collagene. Questa denaturazione del collagene porta ad una contrazione immediata, con effetto progressivo nei trattamenti successivi. Viene stimolata anche l'attività dei fibroblasti con sintesi di nuovo collagene e aumento della densità dermica. Ciò distende visibilmente i tessuti e riduce la lassità cutanea determinando un visibile effetto simil-lifting.

Rughe levigate
Contorno occhi levigato
Pelle più bianca
Occhi più tesi
Occhiaie diminuite
Pelle rassodata



**Sonda tripolare
VISO**

PRINCIPALI FUNZIONI E PERFORMANCE

Corpo RF

Adatta sia al corpo che al viso.

Grazie alla trasmissione con il manipolo Sestupolare è possibile raggiungere gli strati meno superficiali della pelle per agire sulle adiposità localizzate e stimolare effetti di lipolisi localizzate, permettendo una rapida attivazione grazie alla produzione di energia termica cellulare che fa aumentare la temperatura della zona, attivare la naturale espulsione delle tossine in eccesso dalle ghiandole sudoripare, dalla circolazione enteroepatica e dalla linfa, quindi ottenere un effetto di lipolisi.

Utilizzando la tecnologia per un periodo continuo da 1 a 3 mesi e fornendo in tal modo principi attivi e nutrienti organici per la pelle, viene rafforzata l'azione cellulare, coadiuvata la circolazione sanguigna e linfatica, e riattivato il metabolismo, con l'obiettivo target di rimozione del grasso, controllo del peso, rassodamento della vita e modellamento del corpo.



**Sonda esapolare
CORPO**

**Effetto
DRENANTE
ANTICELLULITE**

**Effetto
RIDUCENTE LIPOLISI LOCALIZZATA**

VANTAGGI

Trattamenti calibrati e controllati automaticamente

Controllo delle intensità del segnale completamente digitale. Permette di personalizzare il trattamento in funzione delle zone da trattare.

Grazie ad un innovativo sistema di rilevamento ad infrarossi, il controllo immediato della temperatura rende il trattamento più sicuro ed efficace.


Risultati immediati

Anche un trattamento breve stimola immediatamente la pelle con un effetto a lungo termine sulla rigenerazione del collagene, mentre un trattamento più lungo permette di ottenere importanti effetti rassodanti.



Sonda RF con luce rossa

STRUTTURA DEL DISPLAY

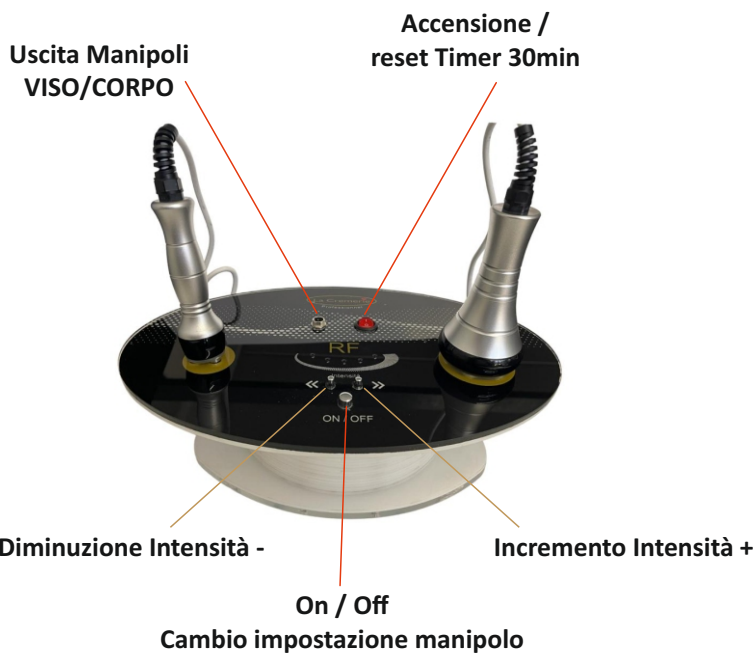

Sonda tripolare
VISO



Sonda esapolare
CORPO



Alimentatore grado medicale 24v
• (medical 60601-1 4th edition safety approvals)

MODALITA' DI UTILIZZO

Grazie per aver scelto il dispositivo RadioFrequenza LaCremerie, un macchinario multifunzione che permette il trattamento delle rughe, il rassodamento della pelle, il trattamento delle adiposità localizzate, la modellatura dell'ovale del viso e permette trattamenti antietà su tutto il corpo.

La RadioFrequenza LaCremerie assicura risultati eccellenti dopo ogni trattamento.

Per permetterti di utilizzare al meglio questo macchinario con massimi risultati è importante attenersi quanto più possibile alle indicazioni di questo manuale.

1. Accensione. Il timer di lavoro predefinito è di 30 minuti ed il segnale sarà interrotto dopo i primi 30 minuti. Per ripartire con altri 30 minuti, è necessario spegnere la macchina e riavviarla, **PREMENDO DI NUOVO START PER RIPARTIRE**.
2. All'accensione è preimpostato il manipolo VISO TRIPOLARE. Per impostare il manipolo CORPO esapolare (sestupolare), premere a lungo il tasto ON/OFF per 3 secondi ed entrare in background, per poter trasferire l'uscita dalla funzione tripolare VISO a quella sestupolare CORPO.
3. Premere a lungo il tasto ON/OFF per tre secondi, la quinta spia lampeggia 6 volte, quindi utilizzare la sonda sestupolare (CORPO) intervallo di intensità di ingresso RF. Se lampeggia il terzo (n°3) led intensità è stato impostato il manipolo VISO, se lampeggia il quinto (n°5) led intensità è impostato il manipolo CORPO.
4. Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario spalmare una quantità sufficiente di prodotti dedicati al trattamento radiofrequenza, per aumentare il risultato ed il comfort del trattamento. Usare il manipolo perpendicolarmente alla superficie da trattare..
5. L'intensità del dispositivo varia da individuo a individuo, è necessario partire dall'intensità più bassa (prima lucetta indicatore intensità verso sinistra).
6. Finito il trattamento sarà sufficiente massaggiare fino al completo assorbimento del prodotto utilizzato.
7. Se non si utilizza la macchina, spegnerla. altrimenti la sonda continuerà a funzionare e potrebbe essere danneggiata. Spegnerne sempre il macchinario e attendere almeno 15 secondi prima di riporre il terminale o il manipolo RF. Controllare SEMPRE LA TEMPERATURA DEL MANIPOLO PRIMA DI UTILIZZARLO SULLA PELLE E VERIFICARE CHE NON SUPERI 42°C. *
8. È necessario pulire ed igienizzare i manipoli a fine uso.

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana in modo da consentire il flusso d'aria in uscita e in entrata (non coprire).
2. Collegare l'alimentatore esterno alla presa di rete 220volt a norma.
3. Collegare l'uscita dell'alimentatore 24volt all'apparecchio di radiofrequenza.
4. Detergere la parte da trattare con un peeling e rimuovere eventuale makeup. Spalmare 2-3 mm di prodotto specifico per RF, sull'area da trattare, iniziare il trattamento sempre all'intensità minima.
5. Dopo aver terminato l'impostazione del livello di energia, operare secondo le immagini sopra. Durante il funzionamento, verificare sempre che ci sia sufficiente prodotto sulla pelle e verificare che il menipolo Radiofrequenza scorre sempre sulle zone con prodotto conduttivo.

ATTENZIONE NON UTILIZZARE LA Sonda TRIPOLARE VISO (3 POLI) CON LE IMPOSTAZIONI DELLA Sonda ESAPOLARE CORPO (6 POLI). Il segnale sarebbe troppo forte.
FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI SULLA PAGINA 2 PER IMPOSTARE ALTERNATIVAMENTE LA Sonda TRIPOLARE O ESAPOLARE (SESTUPOLARE)



Sonda tripolare
VISO



Sonda esapolar
CORPO


6. Spostare lentamente il manipolo, verificando sempre che la temperatura del manipolo e della pelle non superi i 44 gradi.

Non lasciare la sonda sulla stessa area di trattamento per più di 1-2 secondi. Quando la sonda del manipolo non tocca l'area da trattare, l'indicatore luminoso diventa verde.

7. Dopo il trattamento terminare massaggiando il prodotto in eccesso fino a completo assorbimento.**6.** Spostare lentamente il manipolo, verificando sempre che la temperatura del manipolo e della pelle non superi i 44 gradi.

Non lasciare la sonda sulla stessa area di trattamento per più di 1-2 secondi. Quando la sonda del manipolo non tocca l'area da trattare, l'indicatore luminoso diventa verde.


8. Quindi rimuovere il prodotto residuo sull'impugnatura e sugli elettrodi con un panno umido o un fazzoletto, ed igienizzare.

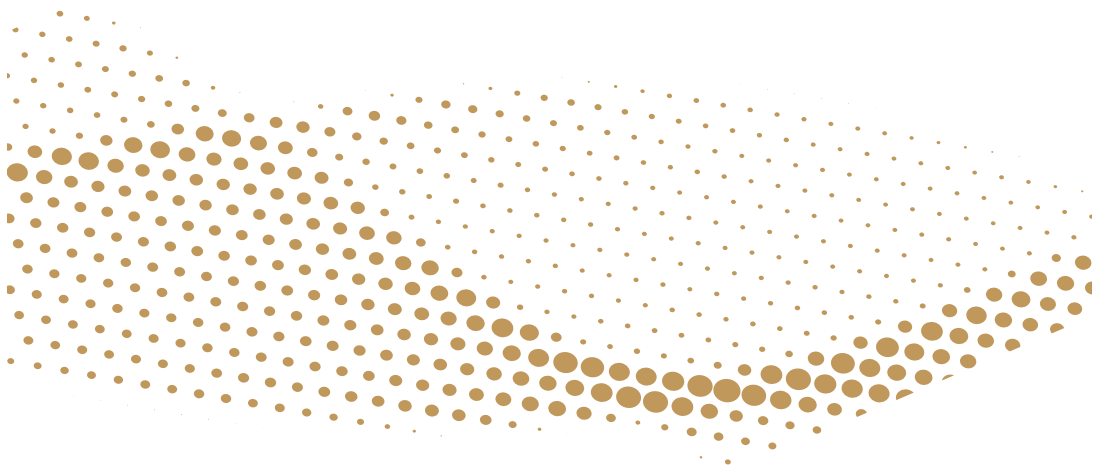

PRECAUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

- Non utilizzare su portatori di impianti attivi come: Pace-maker, pompa insulina o altri; portatori di protesi articolari metalliche; soggetti con processi flogistici in atto, con lesioni cutanee, con neoplasie; su donne in stato di gravidanza.
- Non trattare soggetti con pelle sensibile, eventualmente limitarsi a potenze di erogazione molto basse
- Applicare solo su pelle integra.
- Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto
- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, in particolare, le seguenti avvertenze:
 - Applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.;
 - Non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili elettronicamente attivi;
 - Non applicare in prossimità di protesi metalliche;
 - Non applicare alle donne in gravidanza;
 - Non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini;
 - Collegare le placche ai cavi dell'apparecchio ed usare sempre prodotti cosmetici dedicati per inumidire la parte delle placche a contatto con la pelle;
 - Applicare le placche sulle parti da trattare;
 - Regolare lentamente l'intensità di ogni canale di uscita ad un valore leggermente superiore alla soglia di sensibilità;
 - Assicurarsi che le placche siano adeguatamente distanziate fra loro;
 - Accertarsi dell'integrità del materiale gommoso delle placche e delle placche stesse;
 - Regolare l'intensità di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato

METODI OPERATIVI

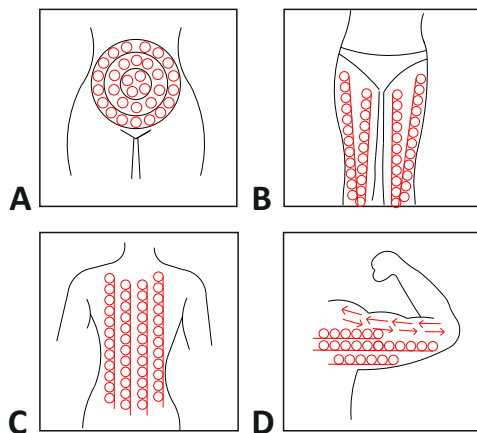


Metodo A + B + C + D :

Con movimenti CIRCOLARI Addome, Gambe, Schiena, Braccio

Metodo E + F + G + H + I :

Con movimenti LINEARI

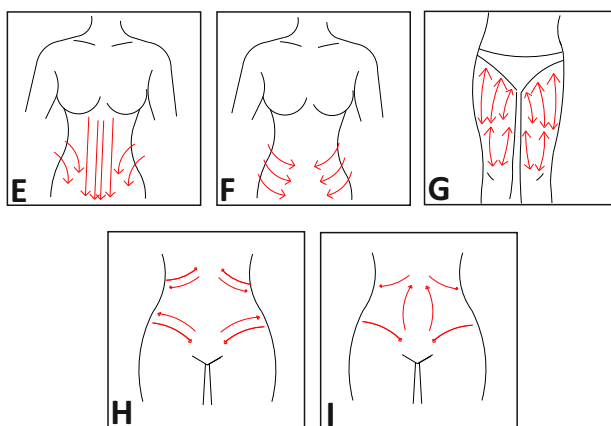

DOMANDE E RISPOSTE

1. Dobbiamo usare prodotto specifico durante il funzionamento?

Risposta: Per risultati ottimali utilizzare i prodotti appositamente studiati per questa radiofrequenza, sia per il viso che per il corpo.

2. Quante volte alla settimana si può trattare un viso o un corpo?

Risposta: Ciascuno è diverso, ma è preferibile non trattare 2 volte in un giorno. Due trattamenti alla settimana porta a risultati ottimali.

3. Impostando una bassa energia, i risultati saranno inferiori?

Risposta: Un livello di energia troppo basso o troppo alto non assicurerà risultati ideali, è opportuno scegliere una temperatura adatta ad ogni cliente. Il risultato ottimale si otterrà mantenendo un livello di intensità sotto la soglia di fastidio. Questa soglia varia da zona a zona da trattare ed è essenziale un colloquio continuo con la cliente per regolare l'intensità leggermente al di sotto di questa soglia. Il calore va percepito ma non deve essere intenso.